

Перед тестуванням уважно ознайомтесь з інструкцією.

SEZAM™

Ультрочутлива тест-касета на вагітність

Інструкція

Хоріонічний гонадотропін (ХГ) є гормоном, який виробляється тканиною плаценти після запліднення. При нормальній вагітності ХГ виявляється у сечі і плазмі вже з 7-го дня після запліднення. Рівень його продовжує швидко зростати, часто перевищуючи 100 мМО/мл до моменту першої затримки місячних і досягає найвищої точки вмісту 100 000-200 000 мМО/мл на 10-11 тиждень вагітності. Присутність ХГ в сечі і плазмі відразу після запліднення і швидке зростання його концентрації під час вагітності використовується для ранньої діагностики вагітності.


Чутливість

10 мМО/мл ХГ у зразку сечі.

Тест-касета на вагітність SEZAM™ визначає вагітність з 7-го* дня після зачаття (до затримки менструації).

Процедура тестування

1. Доведіть тест до кімнатної температури (15-30°C) перед проведенням тестування.
2. Зразок сечі зберіть в суху ємкість.
3. Розкрийте запаяний пакет, дістаньте тест-касету і використайте як можна швидше.
4. Розмістіть тест на горизонтальній поверхні.
5. Внесіть 3 краплі сечі у лунку для зразку на касеті.
6. Результат перевірте через 3 хвилини.

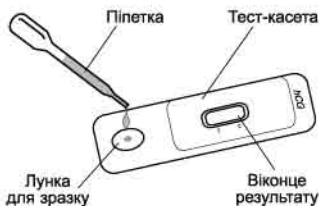

Не приймати до уваги результат тестування через 10 хвилин!

Облік результату



Позитивний результат: вагітність є.

В контрольній (С) та тестовій (Т) ділянках з'явилися червоні або рожеві лінії. Насиченість кольору може бути різною, в залежності від ступеню концентрації гормону вагітності (хоріонічного гонадотропіну).

Негативний результат: вагітності немає.

В контрольній (С) ділянці з'явилась лінія червоного чи рожевого кольору, а на тестовій (Т) ділянці відсутня. Якщо результати тестування негативні, а менструація ще не почалась, необхідно повторити процедуру через 1-2 дні.

Недійсний результат.

В контрольній (С) ділянці не з'явилась лінія. Це означає, що використана недостатня кількість сечі чи неправильно дотримана процедура тестування. Повторіть дослідження, використовуючи нову тест-касету.

Зберігання тесту

Зберігати тест в запаяному пакеті при температурі 2-30° С в темному сухому місці. Не заморожувати. Термін придатності 24 місяці.

Застереження

1. Тест призначається для діагностики in vitro.
2. Не використовувати після закінчення терміну придатності.
3. Тест не призначений для повторного застосування.

SEZAM™ - зареєстрована торгова марка компанії «ФАРМАКО»

* - за умови нормальної вагітності



INSTR. REZONAN 02/08

Питання та відповіді

1. Що робити, якщо є ознаки вагітності (затримка менструації, нагрубання молочних залоз), але тест показує негативний результат?

Якщо у Вас дуже малий термін вагітності, сеча може містити ХГ у концентрації нижче порогового рівня тесту (10 мМО/мл). Тому, якщо підозра на вагітність залишається, необхідно зібрати першу ранкову сечу через 1-2 доби і повторити тестування.

2. Чому при першому тестуванні був отриманий позитивний результат, а при повторному – негативний?

В перший триместр багато вагітностей перериваються в силу природних причин на ранніх термінах. Це може відбуватися у цілком здоровій жінки і пов'язано з аномаліями імплантації або розвитку плідного яйця тощо.

3. Чи може тест давати хибнопозитивний чи хибнонегативний результат?

Так, це можливо при деяких захворюваннях та ендокринних порушеннях. У всіх сумнівних випадках Вам потрібно звернутися до лікаря.



Зберігати при температурі (2-30°C).
Не заморожувати!




Не використовувати
двічі



Перед тестуванням
ознайомтеся з інструкцією



Тільки для
діагностики in vitro

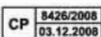

Реєстраційне свідоцтво МОЗ України
№8426/2008 від 03.12.2008р.



Виробник
Acon Biotech Co.,
Ltd (КНР)



Якщо Ви бажаєте спланувати вагітність, компанія «ФАРМАСКО» пропонує SOLO™:

НАБІР СТРУМЕНЕВИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ

- Струменевий формат (не потребує збору сечі)
- Рекомендовані Асоціацією акушерів-гінекологів України
- В наборі 5 тестів для разового визначення овуляції

SOLO™



Якщо Вам потрібно визначити вагітність швидко у зручному місці у будь-який час, але Ви не маєте можливості зібрати сечу, компанія «ФАРМАСКО» пропонує тест струменевого формату DUET™:

DUET™



СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ

- Визначає вагітність через 7-10 днів після запліднення (до затримки менструації)*
- Чутливість 20 мМО/мл
- Рекомендований Асоціацією акушерів-гінекологів України
- Не потребує збору сечі

Якщо Ви бажаєте бути впевненими, що вагітність перебігає без відхилень, пропонуємо протестуватися тестом INEXSCREEN:

ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ПАТОЛОГІЧНОЇ ВАГІТНОСТІ

- Визначає фізіологічну вагітність з першого дня затримки менструації
- Виявлення позаматкової вагітності та ризику викидню
- Чутливість 25 мМО/мл
- Рекомендований Асоціацією акушерів-гінекологів України
- Швидкий результат (вже через 5 хвилин)

inexscreen



Постачальник:

ТОВ «ФАРМАСКО». ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ
01133, м.Київ, вул. Щорса, 31
тел./факс: (+38 044) 537 08 04
e-mail: contact@pharmasco.com; www.pharmasco.com

Pharmasco™
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ